

OPTI-FREE® EXPRESS® Multi-Purpose Disinfecting Solution
NO RUB VOOR LANGDURIG COMFORT

BIJSLUITER

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem voor latere raadpleging.

BESCHRIJVING:

OPTI-FREE® EXPRESS® Multi-Purpose Disinfecting Solution bevat POLYQUAD® en ALDOX®. Deze bestanddelen vernietigen schadelijke micro-organismen (ziektekiemen) maar zijn mild voor het oog. Het bevat ook citraat, dat eiwitaanslag verwijdert terwijl uw lenzen worden bewaard in de vloeistof.

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS zorgt voor langdurig comfort, zodat lenzen de hele dag gedragen kunnen worden, zelfs als u gevoelige ogen hebt.

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS bevochtigt uw lenzen en verzacht lichte irritatie en ongemak tijdens het dragen van uw lenzen. Het gebruik van een zoutoplossing is niet nodig met **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS**.

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS is bedoeld voor het desinfecteren, reinigen, afspoelen, bevochtigen en bewaren van alle zachte contactlenzen, inclusief silicone hydrogellenzen.

INHOUD:

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS is een steriele, gebufferde, isotone, waterige oplossing. Het bevat natriumchloride, sorbitol, dinatriumedetaat, boorzuur, aminomethylpropanol, citraat en TETRONIC®* 1304 als reinigende bestanddelen, POLYQUAD® (polidroniumchloride) 0,001% en ALDOX® (myristamidopropyl dimethylamine) 0,0005%.

*TETRONIC® = geregistreerd handelsmerk van BASF

CONTRA-INDICATIES (redenen om het product niet te gebruiken):

Personen die allergisch zijn voor één van de bestanddelen van **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** zouden dit product niet mogen gebruiken.

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

- Was altijd uw handen en spoel ze af voordat u uw contactlenzen aanraakt. Kies steeds dezelfde lens eerst (de rechter of de linker) om verwisseling te voorkomen.
- Wanneer u een nieuwe ALCON® lenshouder gebruikt, moet u deze vóór gebruik uitspoelen met **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** om eventuele kleine stofdeeltjes te verwijderen.
- Na gebruik de lenshouder altijd leeggieten, uitspoelen met **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** en aan de lucht laten drogen. Alcon raadt u aan uw lenshouder regelmatig te vervangen.

AANWIJZINGEN VOOR HET REINIGEN, DESINFECTEREN EN VERWIJDEREN VAN

EIWITTEN:

Spoel beide zijden van de lens grondig af met **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS**. Vul uw ALCON® lenshouder met voldoende verse **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** om uw lenzen volledig te bedekken. Laat uw lenzen de hele nacht, of minstens 6 uur, in de gesloten lenshouder. Spoel vóór het dragen beide zijden van de lens grondig af om eventuele kleine stofdeeltjes op de lens te verwijderen.

Aan de hand van de samenstelling van uw traanvocht en het draagschema van uw lenzen kan uw oogzorgprofessional u aanvullende producten of procedures voor de verzorging van uw lenzen aanbevelen. Volg altijd de instructies van uw oogzorgprofessional op.

U kunt uw lenzen tot ze weer worden gedragen, en maximaal tot dertig dagen, in de gesloten lenshouder bewaren. Als uw lenzen voor langere tijd worden bewaard, moet u ze om de dertig dagen en voordat u ze gaat dragen met verse oplossing reinigen en desinfecteren.


BEVOCHTING:

Als u tijdens het dragen van uw contactlenzen last heeft van lichte irritatie, ongemak, of wazig zicht, druppel dan één of twee druppels **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** rechtstreeks in het oog en knipper twee of drie keer. **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS** kan naar behoefte de hele dag door worden gebruikt voor bevochtiging.

WAARSCHUWINGEN:

Het is van groot belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgprofessional en alle op de verpakking genoemde instructies opvolgt voor een juist gebruik en een optimale verzorging van uw lenzen en uw lensverzorgingsproducten, inclusief uw lenshouder. Als u last krijgt van aanhoudend ongemak in de ogen, overmatig tranen, veranderingen in uw gezichtsvermogen of rode ogen, doe de lenzen dan ONMIDDELLIJK uit en raadpleeg uw oogzorgprofessional. Het probleem zou namelijk ernstiger kunnen worden.

VOORZORGEN:

- Gebruik altijd verse **OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS**. Gebruik de oplossing in uw lenshouder nooit opnieuw.
- Gebruik altijd de ALCON® lenshouder.
- Zorg ervoor dat de tip van de fles nooit ergens mee in aanraking komt, om besmetting te voorkomen.
- Doe de dop er na gebruik weer op.
- Bewaren bij kamertemperatuur. Vermijd te hoge temperaturen.
- Houd de fles altijd goed gesloten wanneer u deze niet gebruikt.
- Gebruik het product vóór de op de verpakking vermelde vervaldatum. 
- Gooi overblijvende vloeistof zes maanden na eerste opening weg.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet voor gebruik met desinfectie door middel van hitte (thermische desinfectie).

VERPAKKING:

OPTI-FREE® EXPRESS® MPDS, gesteriliseerd door filtratie, is verkrijgbaar in plastic flessen van 120 ml en 355 ml.



ALCON® lenshouder (**OPTIONAL**)

DISTRIBUTEUR VOOR BELGIË: (OPTIONAL)

ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde

DISTRIBUTEUR VOOR NEDERLAND: (OPTIONAL)

Alcon Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 142
4818 CP Breda



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas USA 76134-2099

EC REP

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Verenigd Koninkrijk

U.S. patentnummers 5393491, 5573726, 5631005, 6319464 en 6365636 **(OPTIONAL)**

Europese patentnummers 0669803 en 0948357 **(OPTIONAL)**

CE 0123

©XXXX Novartis